

Polven traktioremmiin eli "jalustimen" käyttöohje polnivelen traktointiin
Tuotenumero 405013

Potilas voi istua esim. Hoitopöydän reunalla siten, että polvitaive on hyvin tuettu pöydän pintaa vasten

Aseta traktioremmiin pehmustettu osa tukevasti nilkan ympärille.

Säädä "julistin" hihna niin pitkäksi, että voit asettaa oman jalkasi jalkaterän hihnalle.



Paina omalla jalallasi hihnaa alas päin, voit samalla palpoida nivelrakoa.

Käytä voimaa asiakkaan tuntemusten mukaan.

Voit myös tehdä pientä edestakaista liikettä, jolloin huomaat nivelraon toiminnan.

