

FES - RehaStim-laitteen ja MOTomed Viva2:n toiminta.

RehaStim-laite kiinnitetään MOTomed laiteeseen.



Potilaan jalat asetetaan MOTomed-laitteen polkimile, kiinnitetään RehaStim-laitteelta tulevat elektrodit ojenta- ja koukistajalihasten päälle.

Käynnistetään MOTomed ja ajetaan moottoriavusteisesti nopeudella 20 rpm.



Käynnistetään RehaStim-laite. Valitaan ohjelmavalikosta esim. 4-elektrodin ohjelma ja nostetaan stimuloitavirran voimakkuutta siten, että lihassupistus on nähtävissä. Virranvoimakkuutta lisätään vielä niin paljon, että polkuliike aktivoituu. MOTomed tunnistaa aktiivisen liikkeen ja näytölle ilmestyy ...”Poljet nyt itse vastuksella 1”



RehaStim-laitteella voidaan stimuloida enintään 8 lihasta tai lihasryhmää: Esim molemmat jalat: ojentajat, koukistajat, pakarot ja pohkeet.

KUNTOVÄLINE OY
OLTERMANNINTIE 8, 00620 HELSINKI
Puh. 09 752 75301, 752 75305
www.kuntovaline.fi