

RehaBike asennusohje

Toimituksen sisältö:

- runko ja poljinpari
- etujalka + 2 kpl kiinnityspultteja
- takajalka + 2 kpl kiinnityspultteja
- mittari + 1 kpl paristo
- avain



Kiinnitä päätyjalat pulteilla.
Pujota pultti alakautta jalan ja
runkokappaleen reijän läpi, asti
prikka ja kiinnitä mutteri

Asenna polkimet:

Oikea poljin, kierre myötäpäivään.
Vasen poljin, kierre vastapäivään.
Kiristä polkimet tiukalle.




R



Mittarin kiinnitys.

Irrota mittarissa olevat 2 ristipääruuvia.
Avaa paristokotelon kansi ja aseta paristo
paikoilleen.

Kiinnitä laiterungon johto mittarin johtoon.
Liuta mittari rungon pidikkeeseen, aseta
mittajohto siten, ettei se jää mittarin ja

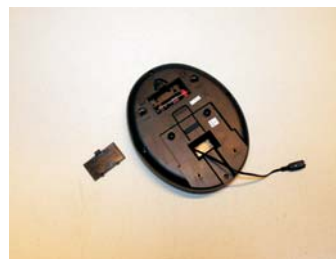

Vastuksen säätäminen tapahtuu
kääntämällä vastusvaijerin
kierintä. Asteikko 1-8.

Vastus mekaaninen
magneettivastus eli
magneetikengän etäisyys
vauhtipyörästä määrää
vastuksen suuruuden.



Maahantuoja:
Kuntoväline Oy, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki.
Puh. (09) 752 75301.
Valmistusmaa: Kiina.